

วิธีทำความสะอาด

Face Shield

1 ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยา
ทำความสะอาด
โดยเช็ดจากด้านในของแผ่นใส
แล้วเช็ดด้านนอกแผ่นใส

2 ข่าเชื้อโดยให้เช็ดด้วยผ้า
ชุบน้ำยาฟอกขาว
หรือสารที่มีส่วนประกอบคลอรีน
0.1% ทำซ้ำ 2 รอบ แล้วทิ้งระยะ
เวลาให้เกิดการข่าเชื้อ

3 ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งสนิท
หรือเป่าลมร้อนให้แห้ง
เช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง
ด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด

4 ไม่นำมาใช้ในกรณี
ที่มีบุคคลไอ จาม ใส่แผ่นใส
และให้ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด

5 ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ด
เพราะจะทำให้พลาสติกเปลี่ยนสี
หลุดลอกง่าย และเกิดฝ้าบน
แผ่นพลาสติก



Face Shield ต้องใส่ร่วมกับหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
และไม่ควรใช้ Face Shield ร่วมกับผู้อื่น

ข้อมูลจากกรมอนามัย

